



Производитель: «Назалезе Лтд.», Великобритания.
Nasaleze LTD, Unit 6, The Shipyard, Ramsey, Isle of Man, IM8 3DT, UK.

Держатель РУ: «Замбон С.п.А.», Италия. Zambon S.P.A., Bresso (MI) Via Lillo del Duca, 10-20091, Italy.

Дистрибьютор в России: ООО «Замбон Фарма», 119002, Москва, Глазовский пер., д. 7.
Тел.: + 7 (495) 933-38-30/32, факс: +7 (495) 933-38-31

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
средство (фильтр) барьерное отоларингологическое

Назаваль®

Наименование медицинского изделия:

Средство (фильтр) барьерное отоларингологическое **Назаваль®**

Регистрационный номер: ФСЗ 2008/02844 от 18.03.2013 г.

Состав: микронизированная целлюлоза растительного происхождения.

Вспомогательные вещества: экстракт натуральной мяты перечной.

Описание: мелкодисперсный порошок белого цвета с легким запахом мяты, по 500 мг во флаконе из полиэтилена с патентованным дозатором и навинчивающимся колпачком. 1 флакон вместе с инструкцией по применению помещен в пачку картонную.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Назаваль® защищает от развития аллергии, предотвращая контакт слизистой полости носа с аэроаллергенами и поллютантами:

- пыльца растений;
- бытовые аллергены — клещи домашней пыли, домашняя пыль;
- грибковые аллергены;
- эпидермальные аллергены животных и птиц;
- аллергены тараканов и других насекомых;
- химические вещества;
- другие микрочастицы, попадающие в носовую полость при вдыхании воздуха.

Назаваль® используется для профилактики и в комплексной терапии аллергического ринита: зуда в носу, отека слизистой носа и нарушения носового дыхания, обильных, жидких, прозрачных выделений из носа, приступов чихания и др.

Назаваль® действует как естественный барьер по отношению к аэроаллергенам, препятствуя развитию аллергии.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Порошок целлюлозы на слизистой полости носа образует прозрачный, гелеобразный, защитный слой, не мешающий дыханию. Гелеобразный слой является эффективным барьером против аллергенов, защищая организм от аллергической реакции.

Спрей назальный, дозированный **Назаваль®** является барьерным средством, не оказывает системного и местного действия.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Применяется при аллергическом рините для защиты слизистой носа от аэроаллергенов и поллютантов, а также других агрессивных факторов внешней среды, вдыхаемых с воздухом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость компонентов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Взрослые и дети: по одному впрыскиванию в каждый носовой ход.

1. Профилактически:

- при аллергии на пыльцу растений (сезонная аллергия) рекомендуется начать использовать **Назаваль®** заблаговременно, за 1–2 недели до предполагаемого начала сезона пыления.
- при круглогодичном рините (аллергии на домашнюю пыль, животных и др.) **Назаваль®** можно использовать ситуационно за 5–10 минут до предполагаемого контакта с аллергеном.



Профилактическое применение **Назаваль**[®] снижает риск обострения аллергического ринита.

2. С целью предотвращения дальнейшего попадания аллергенов в организм в комплексной терапии при лечении аллергического ринита. Рекомендуемая дозировка: по одному впрыскиванию в каждый носовой ход 3–4 раза в день (через каждые 5–6 часов), как правило, достаточно для защиты от аллергенов в течение всего дня. При необходимости, **Назаваль**[®] может быть использован так часто, как это необходимо.

Рекомендуется использовать **Назаваль**[®] перед предполагаемым контактом с аллергенами, например, перед выходом на улицу в период цветения растений, посещением мест массового скопления людей, проведением домашней уборки, контактами с домашними животными.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ:

Назаваль[®] может применяться у женщин во время беременности и в период кормления грудью, поскольку не обладает системным действием и не содержит консервантов.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

- 1 При первом использовании сделайте 2 пробных нажатия на стенки флакона в воздух — вы увидите струйку порошка.
- 2 Перед применением, при необходимости, проведите гигиеническую очистку полости носа.
- 3 Держите голову прямо, нет необходимости ее запрокидывать.
- 4 Встряхните флакон.
- 5 Зажмите пальцем один носовой ход.
- 6 Поместите носик флакона в противоположный носовой ход и, интенсивно нажав на стенки флакона, сделайте одно впрыскивание порошка на вдохе.
- 7 Такую же процедуру проведите с противоположной стороны.

Рекомендуется использовать повторно после каждого очищения носовой полости для возобновления защитного слоя.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Назаваль[®] у детей следует применять под наблюдением взрослых.

Безопасность спрея **Назаваль**[®] обусловлена отсутствием взаимодействия с органами и тканями организма.

Применение барьерного средства (фильтра) **Назаваль**[®] не влияет на способность к управлению транспортными средствами, не вызывает сонливости.

При необходимости совместного применения с другими назальными лекарственными средствами **Назаваль**[®] следует использовать не ранее, чем через 30 минут после их применения. Перед каждым применением **Назаваль**[®] следует очистить носовые ходы. Не рекомендуется использовать **Назаваль**[®] после применения назальных мазей и назальных капель на масляной основе.

При попадании средства **Назаваль**[®] в глаза рекомендуется промыть их водой.

Следует избегать контакта носика флакона со слизистой носа. Это может привести к закупориванию флакона порошком. Если такое все же случилось, прочистите носик флакона тонким острым предметом (иглой, зубочисткой).

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Срок годности — 3 года.

Не использовать при повреждении флакона.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Хранить в местах, недоступных для детей!

Флакон рекомендуется использовать в течение 3 месяцев после первого вскрытия.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Допускается транспортировка всеми видами транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия отпуска:

Отпускается без рецепта врача.